

Notice des accessoires MOBELI



Notice des accessoires MOBELI

1. Domaine d'utilisation

Votre accessoire MOBELI est destiné l'usage évoqué par son nom :

- le support de douchette est uniquement destiné à tenir une douchette
- la pince sur ventouse est uniquement destinée à tenir un objet de 2Kg maximum
- le support articulé est uniquement destiné à tenir un objet de 200 grammes maximum
- le support de rideau de douche est uniquement destiné à tenir un rideau de douche
- les poignées de stabilisation sont uniquement destinées à être fixés sur une table pour stabiliser un membre spastique, le temps de la prise d'un repas ou de la réalisation d'un exercice d'ergothérapie.

Il ne s'agit en aucun cas de systèmes d'appui. Ils ne sont pas destinés à soutenir le poids du corps. Pour vous appuyer ou tirer pour vous relever, il vous faut une barre d'appui à ventouses MOBELI.

2. Vérification

A réception de vos accessoires MOBELI, vérifiez les points suivants :

- état de surface de la ventouse irréprochable
 - présence de tous les éléments : la ventouse, l'accessoire et la rallonge (optionnelle)
- En cas de doute, contactez votre revendeur.

3. Montage et utilisation

- Choisir un support plat, rigide, bien arrimé et non friable, capable de supporter la charge maximale de l'accessoire. Les supports type placoplâtre enduit ou peint, le papier-peint, etc. sont à exclure absolument.
- Nettoyer le support et le sécher.
- Fixer la ventouse sur le support, en poussant le levier en direction du support pour chasser l'air puis en le rabattant.

4. Entretien

Un entretien soigné de votre accessoire MOBELI augmentera sa durée de vie et maintiendra toutes ses qualités au quotidien. Nettoyez régulièrement vos accessoires MOBELI avec du savon ordinaire.

Si vous décrochez votre accessoire, nettoyez et séchez le bien, ainsi que le support avant de le remettre en place.

5. Garantie

Les accessoires MOBELI sont garantis 2 ans à partir de la date figurant sur le bon de livraison ORTHINEA.

La garantie couvre les défauts de fabrication et de matériau. Elle ne couvre pas l'usure normale ni l'endommagement de vos accessoires MOBELI.

6. Certification de conformité

La société ROTH certifie tous ses produits MOBELI conformes à la norme CE 93/42/EEG.

7. Destruction et recyclage

Les accessoires MOBELI hors d'usage doivent être jetés dans la poubelle jaune destinée aux déchets recyclables. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.