



Notice du parapluie POUR FAUTEUIL ROULANT

1. Domaine d'utilisation

Votre parapluie POUR FAUTEUIL ROULANT est destiné à une utilisation normale de parapluie. Il dispose d'un adaptateur permettant son montage sur un fauteuil roulant, un déambulateur, un tricycle adapté ou un scooter électrique pour personnes âgées. Il est destiné à servir en extérieur uniquement. Il peut être utilisé comme parasol. N'utilisez pas votre parapluie POUR FAUTEUIL ROULANT par grand vent. Ne l'installez pas sur un véhicule instable (vélo, 2-roues en général, etc.)

2. Vérification

A réception de votre parapluie POUR FAUTEUIL ROULANT, vérifiez les points suivants :

- fonctionnement du mécanisme d'ouverture du parapluie
- présence du support de parapluie et de la clé à six pans fournie pour le montage

En cas de doute, contactez votre revendeur.

3. Montage et utilisation

a. Installation du support

Déterminez le meilleur point de fixation pour le support. De préférence un tube rond. La noix de fixation du support fait 25mm de diamètre. Nous conseillons d'enrouler un peu de caoutchouc (un bout de chambre à air, par ex.) autour du tube pour stabiliser le montage et protéger la peinture du support. Un enroulement sur plusieurs tours permet aussi de se fixer sur un tube inférieur à 25mm de diamètre sans changer de noix de fixation. D'autres noix de fixation existent, dans un grand choix de diamètres. Vous pouvez en faire l'acquisition auprès du revendeur qui vous a fourni le parapluie.

Défaites les vis de la noix de fixation grâce à la clé à six pans fournie. Faites le tour du tube avec la noix. Remettez les vis en place et serrez-les bien, mais sans trop forcer.

b. Installation et utilisation du parapluie

Desserrez la grosse molette noire du support de 2 tours. Plantez le parapluie dans le support puis resserrez la molette.

Pour ne pas vous blesser, ouvrez de préférence le parapluie en l'éloignant de votre visage. Attention également aux personnes se trouvant à proximité.

N'utilisez pas le parapluie en cas de fort vent. Vous risqueriez de vous blesser et de l'endommager.

4. Entretien

Un entretien soigné de votre parapluie POUR FAUTEUIL ROULANT augmentera sa durée de vie et maintiendra toutes ses qualités au quotidien. Vérifiez régulièrement le serrage des vis. Nettoyez régulièrement votre parapluie POUR FAUTEUIL ROULANT avec du savon ordinaire et mettez quelques gouttes d'un lubrifiant universel (type WD-40) sur toutes les parties mobiles.

Si vous allez à proximité de la mer, rincez abondamment votre parapluie POUR FAUTEUIL ROULANT après chaque sortie pour prévenir l'oxydation.

5. Garantie

Le parapluie POUR FAUTEUIL ROULANT est garanti un an à partir de la date figurant sur le bon de livraison POUR FAUTEUIL ROULANT.

La garantie couvre les défauts de fabrication et de matériau. Elle ne couvre pas l'usure normale ni la casse de votre parapluie POUR FAUTEUIL ROULANT.

6. Certification de conformité

La société POUR FAUTEUIL ROULANT certifie que son parapluie est conforme à la norme CE 93/42/EEG.

7. Destruction et recyclage

Le parapluie POUR FAUTEUIL ROULANT hors d'usage doit être sorti un jour de collecte d'encombrants ou jeté en déchetterie dans la benne « métaux ». Dans certaines communes, il peut être jeté dans la poubelle jaune destinée aux déchets recyclables. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.