


# Siège de toilettes légèrement surélevé

09 107 9326 / AA2117 / 10435/P

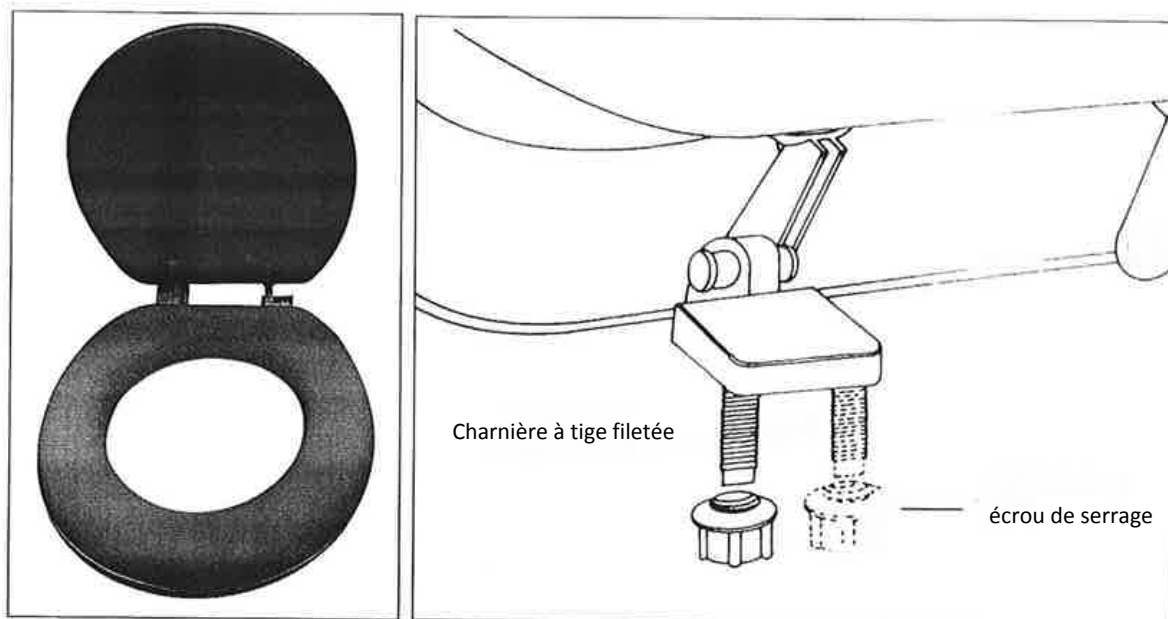

**Attention ! Veuillez vérifier avec soin qu'aucun élément ne présente de fissures ou de fêlures avant utilisation.**

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Compatible avec toute installation de taille standard.

1. Retirez avec précaution l'ancien siège.
2. Placez la charnière à tige filetée dans les trous de fixation de la cuvette.
3. Par le dessous, placez l'écrou en plastique sur la tige filetée de la charnière.

**Attention ! Le siège ne doit pas être utilisé lorsqu'il est mis de côté.**

## INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Pour nettoyer le vinyle facile d'entretien, utilisez un savon et de l'eau ou un désinfectant doux, puis essuyez à l'aide d'une serviette.

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Resserrez les écrous après quelques semaines d'utilisation du siège.

Poids maximal supporté : 91 kg

CE

Fabriqué pour :  
Valentine International Ltd., Taïwan, République de Chine  
Représentant européen agréé :  
Medica Surgical Innovations Limited  
BB2 4PB, Royaume-Uni  
Fabriqué à Taïwan

**homecraft**  


DISTRIBUÉ PAR  
Homecraft Rolyan Ltd., A Patterson Medical Company,