

# COUSSIN DE SÉRIE DE POSITIONNEMENT STANDARD



Vous trouverez ci-joint la version définitive du Coussin de série de positionnement standard INNOV'SA (Réf. CSP).  
Afin de satisfaire au mieux la demande des acteurs de santé et des utilisateurs, nous avons privilégié un nouveau système constitué de deux coussins réglables et adaptables. Cette dernière version du coussin CSP est disponible en TISCARE gris, en BLACK et CHOCO Edition

Le coussin type CSP est un coussin de série de positionnement standard pour les patients **polyhandicapés en alitement prolongé**. Celui-ci pourra, si besoin est, être positionné la journée au fauteuil coquille en position (semi) allongée dans le but d'assurer, **comme au lit la nuit**, un maintien postural des membres inférieurs et/ou de prévenir les postures vicieuses et/ou d'aider à la prévention d'une escarre sur une durée complémentaire à celle du lit chaque jour.

## Descriptif produit

- Coussin en mousse viscoélastique s'adaptant sur le repose jambes (Répartition des pressions et grand confort des jambes)
- Forme galbée anatomique (excellent maintien et bon positionnement des membres inférieurs)



Coussins vue de dos, avec sa sangle de fixation



Coussins vue de dos, reliés et réglables via la sangle



Vue de face, en position rapprochée



Vue de face en position éloignée

### Indications :

Préserver l'intégrité fonctionnelle (position de l'articulation et antalgie notamment) et l'intégrité structurelle (cutanée notamment) de la hanche et du genou du patient plurihandicapé lors de l'alitement prolongé (au-delà de 15 heures par 24 heures) quelle que soit l'étiologie.

### Contre-indications :

- Agitation ;
- Postures douloureuses.